

# VAPOR-CLEAN™

## Malign Hypertermi klar innen 90 sekunder

Malign Hypertermi er en livstruende tilstand. Med VAPOR-CLEAN renses anesthesiapparatene for toksiske anestesigasser (isofluran, sevofluran og desfluran) innen 90 sekunder. Nye anesthesiapparater har i dag flere komponenter som kan lagre anestesigasser f.eks plast og gummipakninger, noe som gjør at det tar lengre tid å luften ut anestesigassene. Det kan ta opp til 50-75 minutter med en hastighet på 10l/minutt å luften ut gassene. Med VAPOR-CLEAN tar man bort dette problemet.

Organisasjonen European Malignant Hyperthermia Group (EMHG) anbefaler bruk av VAPOR-CLEAN. [www.emhg.org](http://www.emhg.org)



90 Second Anesthesia Machine Preparation  
For MH-Susceptible Patients

VAPOR-CLEAN

 Dynasthetics



## Produkt informasjon

- VAPOR-CLEAN inneholder granulater av aktivt kull som binder anestesigassene til seg.
- >99% av anestesigassene (isofluran, sevofluran og desfluran) luftes ut innen 90 sekunder.
- Tester viser at det etter 2 minutter er det igjen mindre enn 5ppm anestesigasser.
- Kobling er 22mm hun/han som passer til alle anestesystem
- Resistans: < 3cm H<sub>2</sub>O ved 1l/sek; < 1,5cm H<sub>2</sub>O ved 0,5l/sek
- Filter volum: 92ml
- 2 års holdbarhet

Produkt nr	Beskrivelse	Forpakning
SKU101	VAPOR-CLEAN, 8 sett med 2 filtre	Eske med 8 sett
SKU111	VAPOR-CLEAN, 3 sett med 2 filtre	Forpakning m/3 sett

Kontakt informasjon:

[info@inclino.no](mailto:info@inclino.no)

[www.inclino.no](http://www.inclino.no)